

 **MEYRA**<sup>®</sup>



 **MEYRA**<sup>®</sup>

**iMOVE**  
stay active!

LE REPOSE-PIEDS ACTIF POUR PLUS  
DE MOUVEMENT EN POSITION ASSISE

MEYRA®

iMOVE

## Polyvalent

À partir de la position assise, position d'appui et position couchée, l'iMove permet d'atteindre les objectifs d'entraînement visés, tels que soulagement de jambes fatiguées et lourdes, stimulation de la pompe veineuse, amélioration de la circulation sanguine, relâchement des épaules et de la nuque, relaxation. L'iMove peut également aider à s'endormir



## Simple

### COMMANDE INTUITIVE

#### Directement sur l'appareil

Le côté gauche de l'iMove comporte les touches Marche/Arrêt ainsi que les touches pour le réglage de la vitesse (fréquence) des mouvements de balancement.



#### Par télécommande (contre supplément)

Vous pouvez ainsi en tout confort activer et désactiver l'iMove par le biais d'une connexion Bluetooth et réguler la vitesse (fréquence) des mouvements de balancement.



#### Par appli (en option)

L'appli gratuite est disponible pour iOS et Android. L'iMove peut être commandé par un couplage Bluetooth et on obtient ainsi des services supplémentaires, p. ex. des analyses d'entraînement.

## Souple

### COMPACT ET LÉGER À TRANSPORTER, RAPIDEMENT OPÉRATIONNEL

L'iMove se laisse intégrer sans problème dans la vie quotidienne. Dans la vie privée sur le canapé, dans la vie professionnelle au bureau ou pour cause de maladie dans le fauteuil roulant – l'iMove compact et léger est rapidement installé et utilisable de manière polyvalente. Outre l'entraînement, il permet d'exercer d'autres activités, telles que lire, regarder la télévision ou travailler.

### LE REPOSE-PIEDS ACTIF POUR PLUS DE MOUVEMENT EN POSITION ASSISE


L'iMove est un nouvel appareil d'exercice innovant et convient pratiquement à tous. Il permet un entraînement physique simple, également en position assise, qui est particulièrement ménageant pour les articulations.

## Efficace


Des témoignages montrent que l'iMove peut détendre et décontracter la musculature, stimuler le métabolisme et la circulation sanguine, et améliorer le drainage lymphatique et veineux.

### RÉSULTAT D'UNE ANALYSE DE SANG VITAL : MEILLEURE FORMULE SANGUINE AVEC L'IMOVE

Les globules rouges sont plus ordonnés et non collés, le plasma sanguin est clair. La circulation fine et le métabolisme des organes sont garantis de manière optimale.

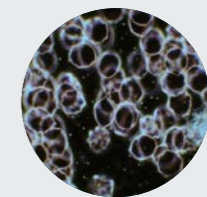

sans iMove

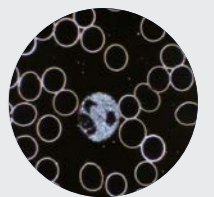

avec iMove

Prises de vues de janvier 2016 dans le cabinet collectif de médecine naturelle, Arno Leixner (praticien de médecine naturelle) à Landsberg am Lech du patient Matthias Wagner.

## Sans peine

### MOBILISE PRATIQUEMENT LE CORPS ENTIER EN PASSANT ET SANS PEINE

Placer l'appareil simplement sur un support plat et stable (faibles vibrations) à l'intérieur de la pièce, le brancher et se laisser mouvoir par l'iMove à sa vitesse personnelle de bien-être. La vitesse (fréquence) des pédales tournant automatiquement dans le sens inverse l'une de l'autre peut être adaptée. La variation des positions du pied ou de la main, de la posture et la pression contraire exercée permet de générer des effets d'entraînement divers.

**PLUS D'INFOS**

[www.meyra.de/amg](http://www.meyra.de/amg)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS

## iMOVE

Désignation du type	MEYRA iMove
Numéro de série	cf. plaque signalétique
Poids	env. 5 kg
Capacité de charge max.	25 kg
Dimensions totales (L x L x H)	320 x 340 x 90 mm
Fréquence	env. 1 – 12 Hz
Amplitude max.	env. +/- 4 mm
Course	env. 8 mm

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Bloc d'alimentation	Modèle MW no. GST60A24-P1J
Entrée	100 - 240 volts AC, 50/60Hz, 1,4 A
Sortie	24 volts, tension continue 2,5 A
Puissance absorbée	max. 60 watts






Le MEYRA iMove fait partie du concept AMG, la nouvelle série MEYRA pour une vie autodéterminée dans ses quatre murs.

---

### MEYRA GmbH

 Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal-Kalldorf

 Tél +49 5733 922 - 0  
 Fax +49 5733 922 - 9311

 [info@meyra.de](mailto:info@meyra.de)

[www.meyra.de](http://www.meyra.de)

---